



BRUGERMANUAL HF-200

HF-200 SORT | HF-200 GRØN
HF-200 RØD

1. Introduktion	2
2. Sikkerheds- og advarselsmeddelelser	3
3. Tekniske detaljer	4
4. Produktbeskrivelse	5
5. Udpakning og kontrol af produktet	6
6. Bremse og parkeringsbremse	8
7. Stokkeholder	8
8. Hjælp over kantsten	8
9. Fold i 4 trin	9
10. Vedligeholdelse	9
11. Rengøring	9
12. Opbevaring og transport	10
13. Tekniske data	10
14. Bortskaffelse	11

1. INTRODUKTION

Kære kunde

Vi ønsker dig tillykke med din nye Lindebjerg rollator. Vi takker dig for din tillid og håber du får stor glæde af dit nye produkt. Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt igennem. Fremfor alt skal du være opmærksom på sikkerheds- og advarselsmeddelelserne, samt vores meddelelser om den tilsigtede anvendelse!


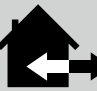

Læs denne brugermanual omhyggeligt

Læs denne brugermanual igennem før installation og brug. Brugermanualen er beregnet til at gøre dig fortrolig med dit produkt. Samt oplyse om korrekt brug for at forhindre materielle- og personskader.

Følg instruktionerne i denne brugermanual

Følg altid instruktionerne og brug kun rollatoren som beskrevet i denne brugermanual. Forkert brug kan resultere i person- og eller materielle skader.

2. SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMEDDELELSER

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse
Internationalt genbrugssymbol		Genanvendeligt materiale
Bortskaffelse		Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
CE-mærkning		Produkter mærket med dette symbol, er lavet i overensstemmelse med alle lovkrav fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Inden- og udendørs		Velegnet til indendørs og udendørs brug.
ADVARSEL!		Dette symbol angiver en fare med et højt risikoniveau, vis dette ikke undgås, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.



ADVARSEL!

- Læs denne vejledning grundigt, og følg instruktionerne, når du bruger produktet.
- Brug kun rollatoren på fast grund.
- Overhold altid den max brugervægt (136 kg) og tilbehørets max vægt.
- Rollatoren må kun bruges som transportmiddel, når den er korrekt samlet. Kontroller ved brug, at bremserne virker korrekt.
- Parkeringsbremsen skal være tilkoblet, når rollatoren foldes og foldes ud.
- Overhold altid den mindste og maksimale tilladte højde for sikker brug. Hæng ikke noget i håndtagene, rollatoren kan vælte.
- Vær forsigtig ved foldning og udfoldning af rollatoren, da fingre eller tøjdele kan blive klemt.
- Udsæt ikke rollatoren for direkte sollys i længere perioder. Temperaturer over 40°C eller under 0°C bør undgås.
- Brug ikke rollatoren til andre formål end at gå (eksempelvis som transport af tunge ting). Dette kan medføre fare og er derfor ikke tilladt. Brug ikke rollatoren som en kørestol.
- Brug ikke rollatoren på trapper / rulletrapper.
- Der må kun bruges originale dele og tilbehør.

2. SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMEDDELELSER

Kontroller hver gang inden brug:

1. Om rollatoren er helt foldet ud og korrekt låst.
2. Bremserne er fuldt funktionelle.
3. Alle dele er sikkert fastgjort og fungerer som de skal.

Forholdsregler under brug:

1. Rollatoren er ikke beregnet til at blive kørt med personer siddende på den.
Det kan medføre materielle og/eller personskader.
2. Brug ikke rollatoren til at gå baglæns.
3. Vær forsigtig når du skal over en kantsten eller andre forhindringer.
Der skal udvises forsigtighed, når du går på en glat eller ujævn overflade.
4. Du må ikke ændre indstillinger, mens du bruger rollatoren.
5. Vær særlig opmærksom på, at du ikke overskrider maks vægten på indkøbsnettet. (5Kg)
6. Sørg for at alle 4 hjul er i konstant kontakt med overfladen.
7. Aktiver parkeringsbremsen, inden du sidder på sædet.

3. TEKNISKE DETALJER

Overordnede mål og oplysninger

- Højde 81-100cm | foldet 39cm
- Bredde 67cm | foldet 33cm
- Længde 71cm | foldet 33cm
- Sædehøjde: 63cm
- Sæde: 46 x 25cm
- Justerbar håndtagshøjde: 81-100cm
- Maksimal brugervægt: 136kg
- Vægt: ca. 9,5kg – Vægt inkl. emballage: 11 kg
- Hjulstørrelse: 29 x 4 cm (12 "x 1,75")
- Hjultype: Luftgummihjul
- Max tryk: 2 bar (29 PSI)

Specifikationer:


- Aluminiumsramme
- Pulverlakeret maling
- Tværstivning
- Rollatorholder (max 1,5 kg)
- Indkøbsnet (max 5 kg)
- Ergonomiske håndtag

Rollatoren er designet til en maksimal vægt på 136 kg. Rollatoren må ikke bruges, hvis du har alvorlige balance problemer.

Tjek at alt medfølger straks efter modtagelse. Det er et produkt af høj kvalitet, men der kan ske fejl. Derfor beder vi dig om at melde skader eller mangler til vores kundeservice. Forkert brug kan resultere i alvorlig materiel skade og personskader. Vi påtager os intet ansvar for dette!

Det er vigtigt, at produkterne ikke ændres, og at der kun bruges originale dele, der kan garantere rollatorens fulde funktionalitet. Hvis produktet ændres, bortfalder garantien.

4. PRODUKTBESKRIVELSE

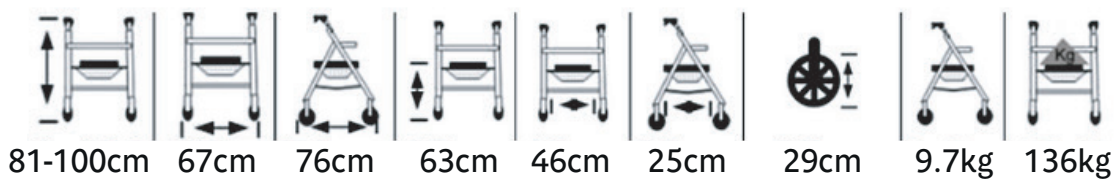

5. UDPAKNING OG KONTROL AF PRODUKTET

Trin 1:

Fjern rollatoren fra kassen.

Kontroller alle dele for skader før du bruger rollatoren. Brug ikke rollatoren, hvis nogle dele er beskadiget eller mangler. Kontakt i så fald kundeservice.




Trin 2:

Fold rollatoren ud.

1.

Læg forhjulet og baghjulet ned. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre forhjulet.

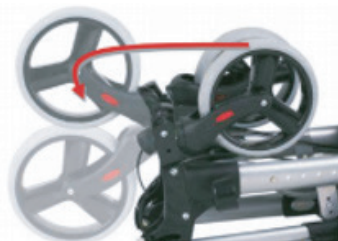

2.

Placer rollatoren stående på hjulene og træk begge sider udad.



3.

Tryk derefter sædet ned på begge sider, indtil du hører et „klik“. Sædet er nu låst.



5. UDPAKNING OG KONTROL AF PRODUKTET

Trin 3:

Hæng indkøbsnettet på holderen.

Nu kan du fastgøre indkøbsnettets
De 2 løkker der findes i hver side af
indkøbsnettets, de skal monteres på
fremhævede rør.



De 4 luftgummihjul er sandsynligvis ikke forsynet med nok luft. Kontroller derfor dæktrykket. Ventilen som sidder på, er den samme som på de fleste mountainbikes og cykler. Pump til 2 bar (29 PSI) med en cykelpumpe. Sørg for at trykket ikke overstiger 2 Bar (29 PSI) for at undgå at dækket glider af fælgen eller skader dækket.

Trin 4:

Justering af højden.

Højden på rollatorens håndtag, kan tilpasses til den ønskede højde. For at justere højden, skal du trykke ind på låsestifterne på begge sider af rollatoren. Du kan nu trække op i håndtagene, indtil den ønskede højde er nået. Der er otte forskellige højder du kan vælge i mellem.

Tryk på den sølvfarvede låsestift, for at justere håndtagets højde til den passende højde. Låsestiften skal stikke ud fra rollatoren og være synlig, for at den er låst.



Tip: Stå op og lad armene hænge ned langs din krop. Håndtagene skal være på niveau med indersiden af dine håndled.

6. BREMSE OG PARKERINGSBREMSE

1. Når du sidder / hviler på din rollator, er det vigtigt du aktivere parkeringsbremsen. Skub bremsehåndtaget ned i begge sider, så aktivere du parkeringsbremsen. Du kan frigøre bremsen igen, ved at skubbe op i bremsehåndtaget igen.

2. Skub bremsehåndtaget op for at aktivere let bremsning.



7. STOKKEHOLDER

Hvis du sætter din stok i stokkeholderen, kan du fastgøre stokken med velcrolukningen ovenpå.

Vær altid opmærksom på at din stok er spændt godt fast, så den ikke falder af og skader rollatoren.



8. HJÆLP OVER KANTSTEN

Skal du over en kantsten, så kan du assistere rollatoren over med din fod.

Den udvidet ramme nede ved hjulet, gør det nemt at bruge foden til at løfte rollatoren over kantstenen.



9. FOLD I 4 TRIN

1. Fjern indkøbsnettet fra rollatoren.
2. Træk håndtaget i midten af sædet opad - rollatoren foldes sammen.
3. Løsne skruerne på forhjulene, og fold derefter hjulene opad.
4. Brug skruerne til at låse hjulene i denne position.



10. VEDLIGEHOLDELSE

Afhængigt af hvordan rollatoren opbevares og bruges, kan din rollator muligvis vise tegn på slid over tid. Du bør derfor kontrollere regelmæssigt for skader og defekte dele. Kontakt straks kundeservice, hvis du opdager mangler. Kontroller alle skruerne regelmæssigt. Dette gælder især skruerne på hjulene. Løse skruer bringer produktsikkerheden i fare. Alvorlige eller endda livstruende skader kan forekomme under brug. Du bør derfor straks stramme eventuelle løse skruer igen.

Vigtig! Kontroller bremserne regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt. Over tid kan bremsekablerne strække sig, hvilket får bremserne til at miste greb. Hvis du bemærker nogen forringelser, skal bremserne straks justeres igen. Hvis omjustering ikke medfører nogen forbedring, bedes du kontakte kundeservice for at diskutere, hvordan du fortsætter. Brug ikke rollatoren i denne periode!

11. RENGØRING

Snavs har en negativ indvirkning på materialeegenskaber og funktionalitet. Af denne grund anbefaler vi, at du rengør rollatoren grundigt med jævne mellemrum.

For at fjerne støv og snavs fra rollatoren skal du tørre det regelmæssigt med en ren, let fugtig klud. Til hårdere tilsmudsning tilsættes lidt mild opvaskemiddel til vandet. Sørg for, at der ikke er nogen sæberester tilbage på overfladen efter rengøring.

Brug aldrig skarpe, spidse eller ridsende rengøringsredskaber til rengøring. De forårsager grimme ridser på overfladen, hvilket gør materialet mere modtageligt for skader og rust. Undgå at bruge aggressive kemikalier eller slibemidler, da disse kan beskadige materialer og overflader.

12. OPBEVARING OG TRANSPORT

Hvis du vil opbevare eller transportere rollatoren, anbefaler vi, at du folder rollatoren omhyggeligt sammen. Dette sparer plads og gør transport og opbevaring meget lettere for dig. Træk blot håndtaget på sædet på din rollator opad. Monter hjulene som beskrevet i kapitel 7, punkt 3. Du kan derefter klappe hjulene forsigtigt op.



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
Opbevar rollatoren på et tørt, varmt og godt ventileret sted. Sørg for, at opbevaringsstedet er opvarmet i den kolde årstid. Sørg også for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation. Ellers kan der ophobes fugt på delene og kan beskadige produktet.

Placer rollatoren på en fast, plan overflade med en ikke-ridsende overflade. Hvis det er muligt, skal du dække det med et tæppe eller presenning. Sådan beskytter du rollatoren mod støv og anden snavs.

13. TEKNISKE DATA

Materiale	Aluminium
Min. Højde	81 cm
Max Højde	100 cm
Sædehøjde	63 cm
Sædebredde	46 cm
Længde	76 cm
Dybde	67 cm
Max. Brugervægt	136 kg
Vægt	9,9 kg
Diameter Hjul	29 cm
Materiale Hjul	PVC
Materiale indkøbsnet	Stof
Anvendelsesområde	Indendørs og udendørs

14. BORTSKAFFELSE

Ikon	Beskrivelse
	<p>Emballagen beskytter mod transportskader ved levering. Emballagematerialet kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde og indleveres til genbrug. Vi anbefaler, at du bortskaffer den leverede emballagefilm med det samme og, at det opbevares utilgængeligt for børn. Hvis emballagen anvendes forkert, kan den medføre kvælning.</p>
 	<p>Hvis du ikke længere bruger produktet, skal det bortskaffes i henhold til gældende regler i din kommune. Produktet må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald, den skal afleveres på din lokale genbrugsstation. Dette sikrer, at produktet bortskaffes korrekt, og at det ikke har negative miljøpåvirkninger.</p>

Lindebjerg A/S
Stensgaardvej 14
5500 Middelfart
Danmark

E-mail: mail@lindebjerg.dk
Tlf. 63 15 00 00

www.lindebjerg.dk



Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.